

A+B型流行性感冒快速檢驗試劑 Flu A&B Rapid Test

衛部醫器製字第006728號



反應10分鐘即可判讀
僅需10分鐘即可獲得篩檢結果




操作簡單 無需儀器
不受使用環境限制 目視判讀即可



單次採檢支援多種病原檢測
萃取液共用 檢測其他病原不需重複採檢



本產品採用鼻咽檢體

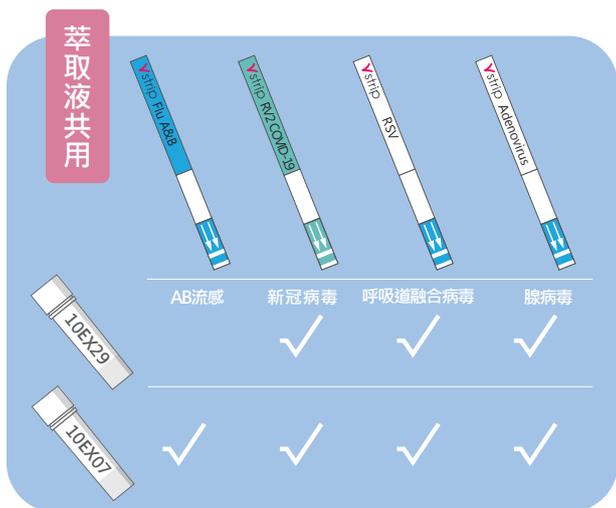


偵測極限 LIMIT OF DETECTION

Flu A 1.0×10^2 pfu / mL

Flu B 1.0×10^3 pfu / mL

內容物

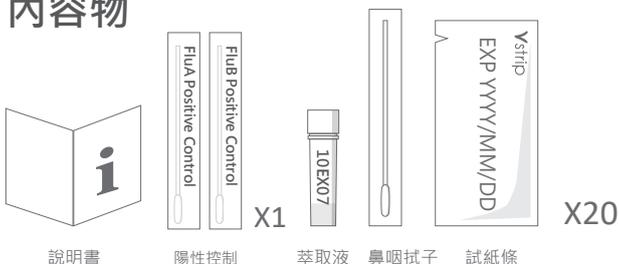

臨床效能 CLINICAL PERFORMANCE

本產品與美國FDA許可上市產品於鼻咽檢體比較結果，於台灣進行132例疑似A型和B型流感病毒患者臨床試驗。使用本產品時，成人和兒童檢體不同可能導致產品性能有所差異，但具體差異尚待釐清。

鼻咽檢體臨床數據

	Vstrip	FDA許可快篩	
		+	-
Flu A	+	36	2
	-	2	92

PPA陽性一致率 · NPA陰性一致率 · OPA整體一致率

PPA (36/38)
94.7%
95%CI 82.3% - 99.4%

NPA (92/94)
97.9%
95%CI 92.5% - 99.7%

OPA (128/132)
97.0%
95%CI 92.4% - 99.2%

	Vstrip	FDA許可快篩	
		+	-
Flu B	+	21	0
	-	2	109


PPA (21/23)
91.3%
95%CI 72.0% - 98.9%

NPA (109/109)
100.0%
95%CI 96.7% - 100.0%


OPA (130/132)
98.5%
95%CI 94.6% - 99.8%




檢體採集 SPECIMEN COLLECTION

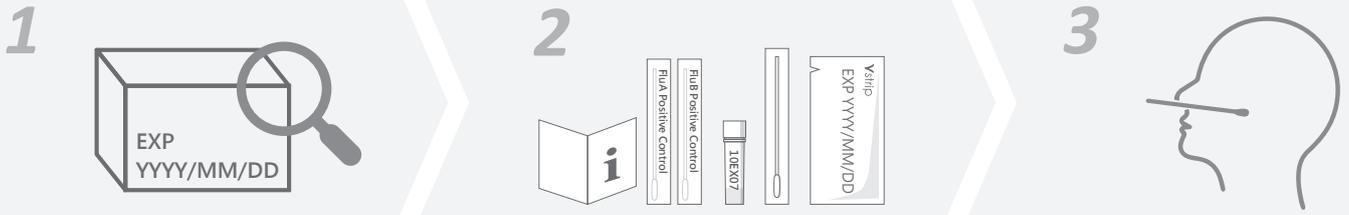

測試步驟 ASSAY PROCEDURE

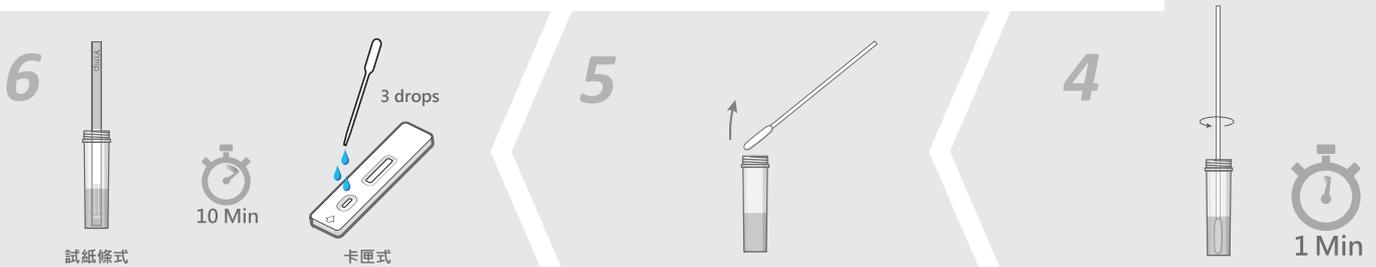

結果判讀 INTERPRETATION OF RESULTS

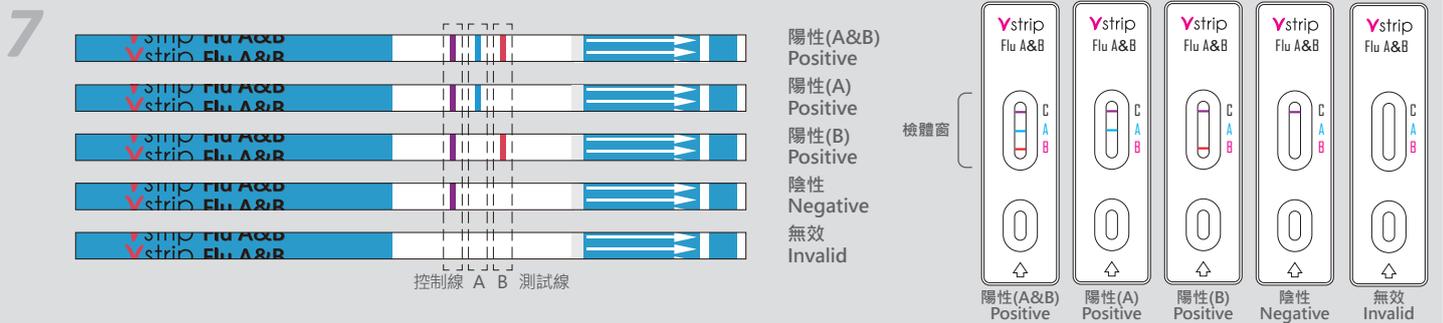

技術支援 TECHNICAL SUPPORT

TEL: + 886-2-2691-9896

Email: xizhi@pbf.com.tw

訂購資訊/參考包裝規格 ORDERING INFORMATION/ PACKAGING

產品型號	規格	備註
1 IG01020S	20 Tests	試紙條式
2 IG01020C	20 Tests	卡匣式

20240313 FLU A&B V01



掃描取得最新資訊

Vstrip official website

<https://www.vstriptechn.com/>



製造業者名稱：寶齡富錦生科技股份有限公司汐止廠二廠

製造業者地址：新北市汐止區大同路1段308之6、308之8號8樓