

## 呼吸道融合細胞病毒快速檢驗試劑 RSV Rapid Test

衛部醫器製壹字第005975號



反應10分鐘即可判讀  
僅需10分鐘即可獲得篩檢結果




操作簡單 無需儀器  
不受使用環境限制 目視判讀即可



單次採檢支援多種病原檢測  
萃取液共用 檢測其他病原不需重複採檢



本產品採用鼻咽檢體

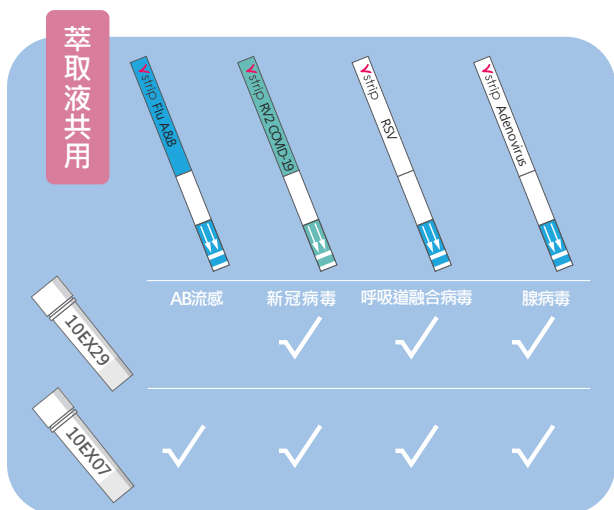


### 偵測極限 LIMIT OF DETECTION

Subgroup A  $2.2 \times 10^3$  TCID<sub>50</sub> / mL

Subgroup B  $3.5 \times 10^3$  TCID<sub>50</sub> / mL

### 內容物

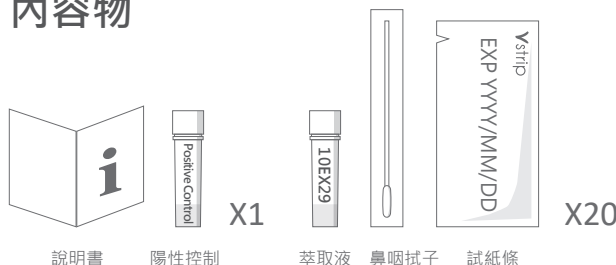

### 臨床效能 CLINICAL PERFORMANCE

臨床效能於2022-2023在台灣建立，共測試180例疑似症狀患者的鼻咽檢體；比較方法為鼻咽檢體的分子診斷(PCR)。鼻咽檢體的抗原測試由專業人員或是受過訓練人員在診間當場進行。

#### 鼻咽檢體臨床數據

Vstrip	PCR	
	+	-
+	52	1
-	9	118

PPA陽性一致率 · NPA陰性一致率 · OPA整體一致率

PPA (52/61)  
**85.3%**  
95%CI 73.8% - 93.0%

NPA (118/119)  
**99.2%**  
95%CI 95.4% - 99.9%


OPA (170/180)  
**94.4%**  
95%CI 90.3% - 97.3%

#### 陽性一致率與CT值


Ct	Vstrip+ / PCR +	PPA
11-20	27/27	100.0%
21-30	20/23	87.0%
>30	5/11	45.5%
ALL	52/61	85.3%




## 檢體採集 SPECIMEN COLLECTION

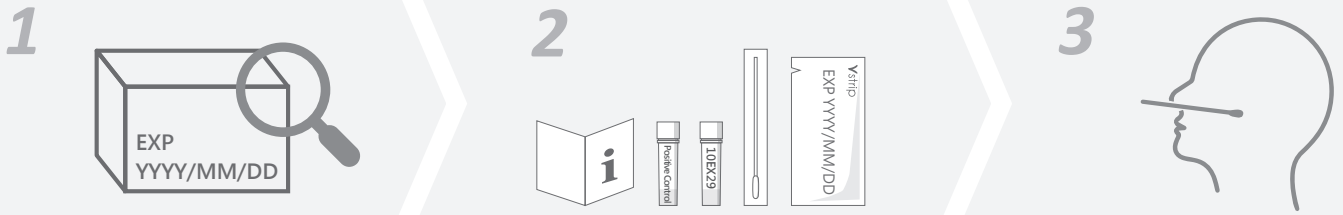

## 測試步驟 ASSAY PROCEDURE

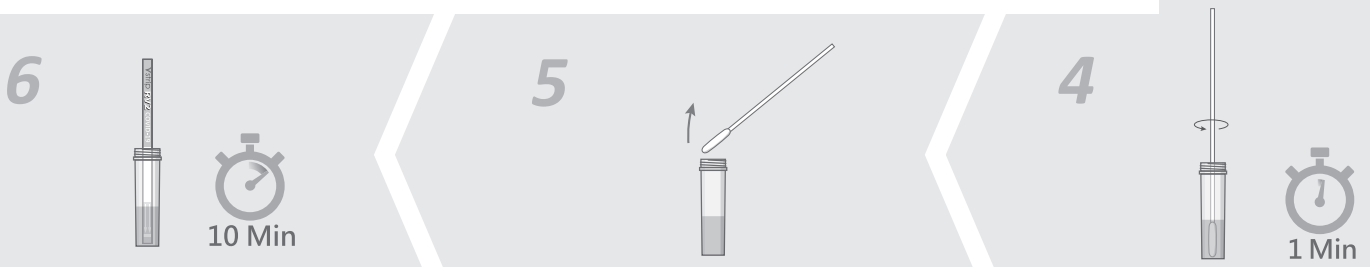

## 結果判讀 INTERPRETATION OF RESULTS

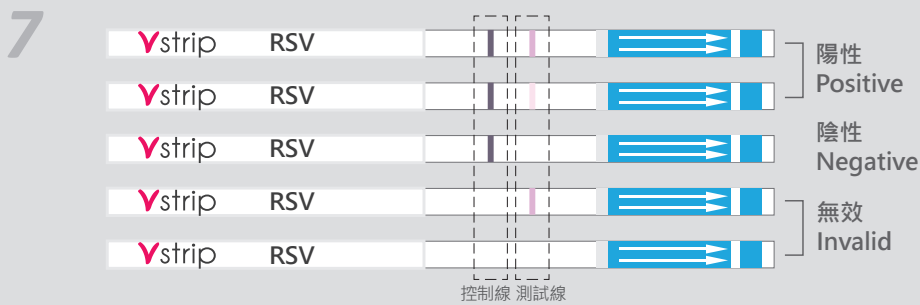

### 技術支援 TECHNICAL SUPPORT

TEL: + 886-2-2691-9896  
Email: xizhi@pbf.com.tw

### 訂購資訊/參考包裝規格 ORDERING INFORMATION/ PACKAGING

產品型號	規格	備註
1	IGo2005So2	5 Tests 試紙條式
2	IGo2010So2	10 Tests 試紙條式
3*	IGo2020So2	20 Tests 試紙條式
4	IGo2025Co2	25 Tests 卡匣式

20231214 RSV V02



掃描取得最新資訊  
Vstrip official website  
<https://www.vstriptechnology.com/>



製造業者名稱：寶齡富錦生科技股份有限公司汐止廠二廠  
製造業者地址：新北市汐止區大同路1段308之6、308之8號8樓