

腺病毒快速檢驗試劑 Adenovirus Rapid Test

衛部醫器製壹字第005973號



反應10分鐘即可判讀
僅需10分鐘即可獲得篩檢結果




操作簡單 無需儀器
不受使用環境限制 目視判讀即可



單次採檢支援多種病原檢測
萃取液共用 檢測其他病原不需重複採檢




本產品採用鼻咽檢體

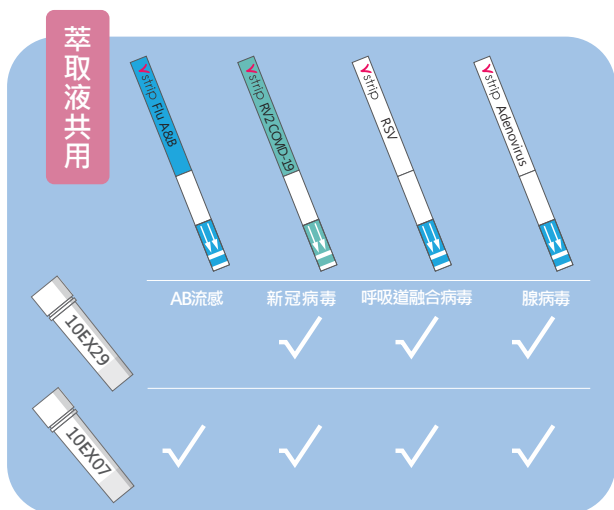

偵測極限
LIMIT OF DETECTION

9.0×10^4 TCID₅₀ / mL

內容物

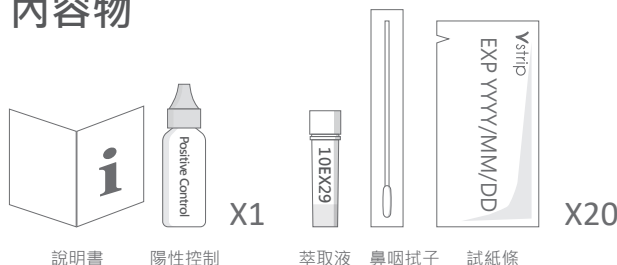

臨床效能 CLINICAL PERFORMANCE

臨床效能於2023在台灣建立，共測試96例疑似症狀患者的鼻咽檢體；比較方法為鼻咽檢體的分子診斷(PCR)。鼻咽檢體的抗原測試由專業人員或是受過訓練人員在診間當場進行。

鼻咽檢體臨床數據

Vstrip	PCR	
	+	-
+	22	0
-	5	69

PPA陽性一致率 · NPA陰性一致率 · OPA整體一致率

PPA (22/27)
81.5%
95%CI 61.9% - 93.7%

NPA (69/69)
100.0%
95%CI 94.8% - 100.0%


OPA (91/96)
94.8%
95%CI 88.3% - 98.3%

陽性一致率與CT值


Ct	Vstrip+ / PCR +	PPA
≤20	3/4	75.0%
≤25	18/19	94.7%
≤30	22/25	88.0%
ALL	22/27	81.5%




檢體採集 SPECIMEN COLLECTION

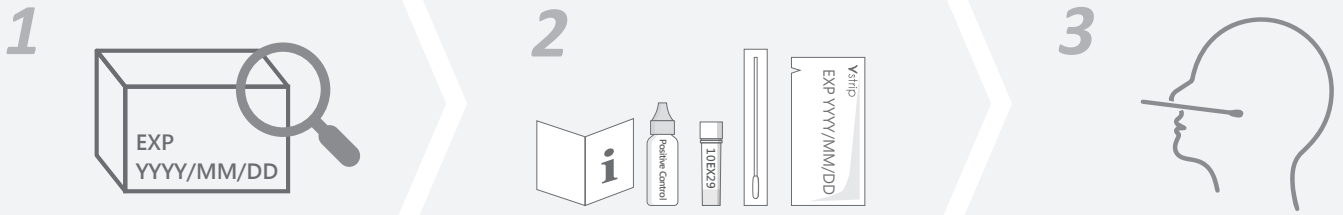

測試步驟 ASSAY PROCEDURE

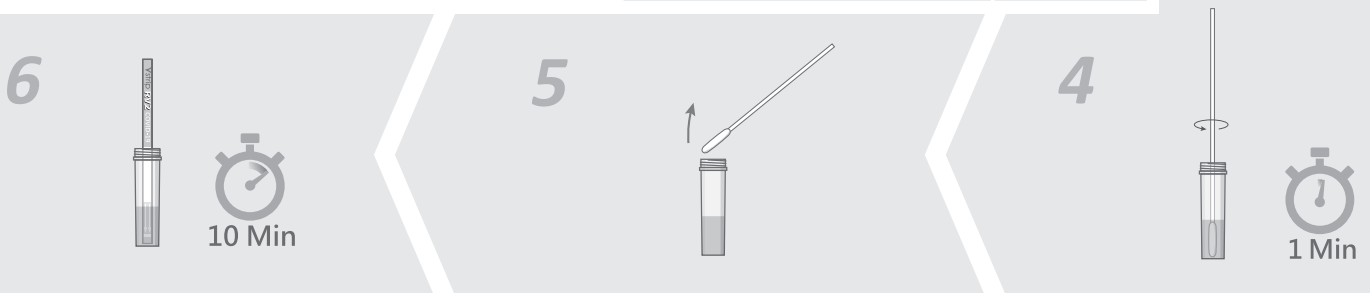

結果判讀 INTERPRETATION OF RESULTS

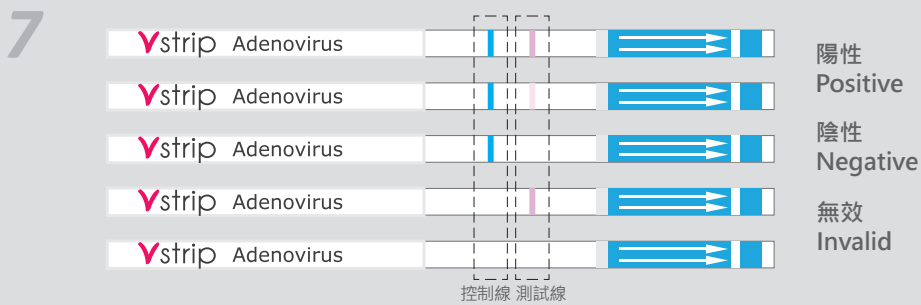

技術支援 TECHNICAL SUPPORT

TEL: + 886-2-2691-9896

Email: xizhi@pbf.com.tw

訂購資訊/參考包裝規格 ORDERING INFORMATION/ PACKAGING

產品型號	規格	備註
1 IG05020S01	20 Tests	試紙條式
2 IG05025C01	25 Tests	卡匣式

20231214 ADV V02



掃描取得最新資訊

Vstrip official website

<https://www.vstriptechn.com/>



製造業者名稱：寶齡富錦生科技股份有限公司汐止廠二廠
製造業者地址：新北市汐止區大同路1段308之6、308之8號8樓