

輪狀病毒快速檢驗試劑 (未滅菌) 卡匣式 Rotavirus Rapid Test

衛部醫器製壹字第005974號



本產品採用糞便檢體



反應10分鐘即可判讀
僅需10分鐘即可獲得篩檢結果



操作簡單 無需儀器
不受使用環境限制 目視判讀即可



結果分色顯示 判讀更簡易
控制線與檢測線呈色不同 明顯區分判讀結果



無交叉反應 不受常見干擾物影響
不受6種常見藥物與34種病毒細菌影響反應

偵測極限 LIMIT OF DETECTION

ATCC VR-2104 8.9×10^4 TCID₅₀ / mL
ATCC VR-1546 1.4×10^5 TCID₅₀ / mL
ATCC VR-2018 5.0×10^5 TCID₅₀ / mL

內容物



說明書

X1



陽性控制



萃取液



試紙條

X25

干擾物 INTERFERENCE SUBSTANCES

干擾物測試，使用臨床陰性檢體，針對下表所列濃度進測試，每次測試皆為三重複。測試結果並沒有發生干擾現象。


Interference substances	Testing Conc.	Interference substances	Testing Conc.
1 Aspirin	20mg/ml	6 Voren Supp.	12.5mg/ml
2 Barium sulfate	0.25 mg/ml	7 PECOLIN	5%
3 Bilirubin	0.25 mg/ml	8 Blood	0.05%
4 Hemoglobin	0.25 mg/ml		
5 Metronidazole	0.25 mg/ml		

檢體採集 SPECIMEN COLLECTION

1



2

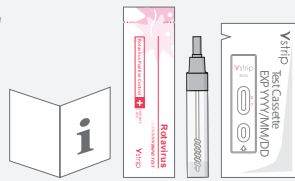


3




測試步驟 ASSAY PROCEDURE


6

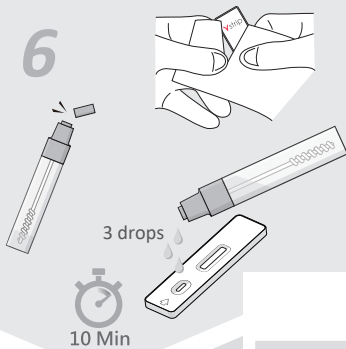

5

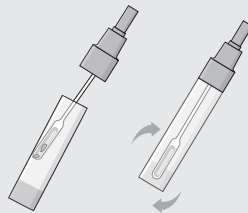


4

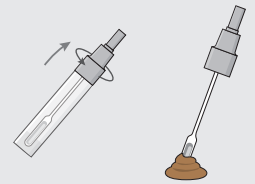

7

結果判讀 INTERPRETATION OF RESULTS

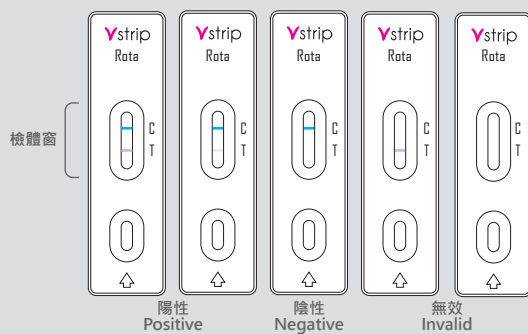

技術支援 TECHNICAL SUPPORT

TEL: + 886-2-2691-9896

Email: xizhi@pbf.com.tw

訂購資訊/參考包裝規格

ORDERING INFORMATION/ PACKAGING

產品型號	規格	備註
1 IG04025C01	25 Tests	卡匣式

20240313 Rota V01



掃描取得最新資訊

Vstrip official website

<https://www.vstriptechnology.com/>



製造業者名稱：寶齡富錦生技股份有限公司汐止廠二廠

製造業者地址：新北市汐止區大同路1段308之6、308之8號8樓