

Ystrip飛確

幽門桿菌
快速檢驗試劑


採檢指引



掃描觀看操作影片


IP06038IN V02

1 檢體標示

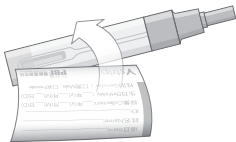


將病例貼紙上寫下姓名等資訊，貼於管身。
※ 注意：請勿將管內液體倒出。

2 檢體準備

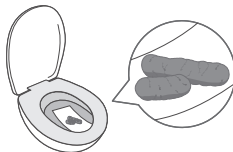


於馬桶離水處排便，並先鋪上衛生紙，
避免糞便掉入水中影響採檢。

3 取出採檢棒

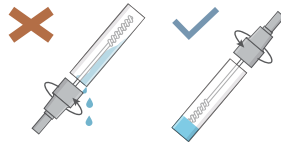


將檢體管保持直立，並慢慢旋轉打開
瓶蓋，避免裡面的液體流出。

4 檢體採集

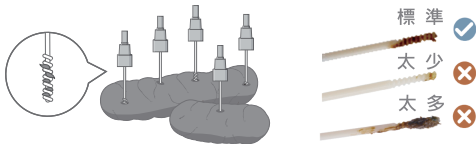

將採檢棒螺旋端插入糞便中至少 5 個不同位置，填滿凹槽並避免碰到馬桶內的水。採集量以示意圖為準，勿過多、過少，也勿採集水便或乾便。

5 檢體保存

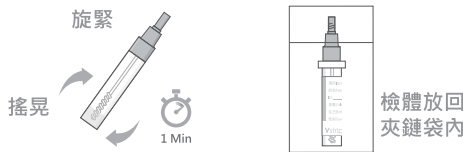

旋緊採檢棒瓶蓋後，充分搖晃檢體瓶至少 1 分鐘，使糞便均勻分散，並放入夾鏈袋中保存。
檢體可存放於 2-8°C 冷藏環境下，並於 7 日內進行測試；
或存放於室溫環境下，請於 3 日內完成測試。